



HELIOS®

Excelerator

Excelerator

Zur Therapie bei
Verletzungen des
oberen Sprunggelenks

med.kontex®

Markenqualität vom Spezialisten

Zur Therapie bei Verletzungen des oberen Sprunggelenks

HELIOS® Exceleator bietet in Verbindung mit einem Schnürschuh optimale Stützwirkung. Nach kurzer Zeit kann sich die Schiene durch die zurückgehende Schwellung etwas lockern. Ziehen Sie dann die Klettbänder noch einmal nach, bis Sie wieder optimalen Halt haben. Sollte die Schiene jedoch drücken, lockern Sie die Bänder und verändern Sie eventuell die Lage der seitlichen Schalen etwas.

Kältetherapie:
Zur gleichzeitigen Kältetherapie entfernen Sie die herausnehmbaren Gelpolster aus den festen Kunststoffteilen und legen sie für

2 Std. in den Kühltank. Danach die Polster wieder an den Klettverschlüssen befestigen und die Schiene anlegen. Auch während der Kältetherapie Baumwollstrümpfe tragen! Die gesamte Schiene kann in warmem Wasser mit mildem Waschmittel mit der Hand gewaschen werden. Keine künstliche Wärme zum Trocknen zuführen!

- n Ein seitliches Umknicken wird verhindert, während die normale Bewegung nur wenig eingeschränkt ist.
- n Die weichen Gelpolster passen sich dem Knöchel optimal und angenehm an.
- n Zusätzlich zur Stabilisierung ermöglicht HELIOS® Exceleator mit seinen herausnehmbaren Gekissen eine gleichzeitige Kältetherapie, die abschwellend und schmerzlindernd wirkt.
- n Unter der Schiene sollte immer ein Baumwollstrumpf getragen werden



med.kontex® – medizinische Hilfsmittel und OP-Textilien in sicherer Qualität

Die med.kontex® GmbH ist Ihr Spezialist für die Marken HELIOS® und derma.kontex® mit den Produktlinien der orthopädisch-chirurgischen Hilfsmittel und OP-Textilien. Mit unserem umfassenden Know-how, das aus den Unternehmen Schumacher medical Produkte, Krefeld, und tyco healthcare Deutschland hervorgegangen ist, bieten wir Ihnen ein breites Leistungsspektrum:

- Individueller, flexibler Service
- Schnellste Lieferzeiten
- Bedarfsgerechte Bestellungen
- Kostengünstige Vertriebslösungen
- Hohe Markenqualität, Made in Germany

So bestellen Sie:

HMVNr. 05.02.03.0032

Größen	Maße	REF	VE
1 / klein	22,5 cm	2507771	1
2 / mittel	23,5 cm	2507781	1
3 / groß	25,3 cm	2507791	1

HELIOS® is a Trademark of Tyco Healthcare Deutschland GmbH.